

Použitie sterových tampónov

1. Na genetické vyšetrenie môžete použiť lícný ster. Na jeho odber sa používajú sterové tampóny, príp. kefky. Štúdie potvrdili, že použitie tampónov je ekvivalentné k používaniu kefiek.
2. Ster by mal robiť veterinár. Veterinár musí aj svojím podpisom potvrdiť identitu zvierťa, pokiaľ máte záujem o vystavenie certifikátu.
3. Kvôli nožnej kontaminácii DNA z iného zdroja by zviera nemalo byť kŕmené 1-2 hodiny pred odoberaním steru.
4. Ak je to možné, stierajte, až kým sa neobjaví povrchové krvácanie zo sliznice ústnej dutiny. Tak budete mať istotu, že sa v stere nachádza dostatok buniek.
5. Nie je možné vykonať genetický test, ak sa v stere nenachádza dostatočný počet buniek. Preto sa odporúča spraviť dva stery od jedného zvierťa.
6. Tampóny by mali po odbere schnúť na vzduchu 1-2 hodiny.
7. Skúmavku nezameniteľne označte (napr. menom majiteľa + menom zvierťa).

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.