

VZORKY NA VYŠETRENIA ZRÁŽANLIVOSTI KRVÍ

(Quick test, PTT, trombínový čas, faktory zrážania)

1. Výber skúmavky

- skúmavka s obsahom citrátu sodného (nápis Coagulation 9 NC)
- dôležitá je kontrola expirácie skúmavky

2. Odber krvi

- odber do skúmavky presne po rysku
- odber s uvoľneným škrtidlom
- ideálne ako 2. skúmavka po odbere na sérum, odbery do skúmaviek s inými antikoagulačnými činidlami (napr. EDTA) nasledujú až po odbere na koaguláciu

3. Centrifugácia

- bezprostredne po odbere a premiešaní vzorky
- 5 min pri 3000 otáčkach/min

4. Separácia plazmy do čistej skúmavky bez činidiel

- transportuje sa plazma, nie plná krv

5. Chladenie / mrazenie

- bezpodmienečne nutné u vzoriek na vyšetrenie von Willebrandovho antigénu
- chladenie odporúčané aj u ostatných testov

